

PERIOFLUSH

KIT D'IRRIGATION DES POCHES PARODONTALES



ARKONA

PERIOFLUSH

KIT D'IRRIGATION DES POCHES PARODONTALES


- **NETTOIE LES POCHES PARODONTALES**
- **DISSOLVE ET DILUE LE CONTENU INFLAMMATOIRE NICHÉ DANS LES POCHES**
- **ÉLIMINE 99 % DES MICROORGANISMES**




POURQUOI PERIOFLUSH EST-IL INDISPENSABLE?



90 % de la population (y compris les enfants) a souffert de l'inflammation des gencives au moins une fois dans leur vie.

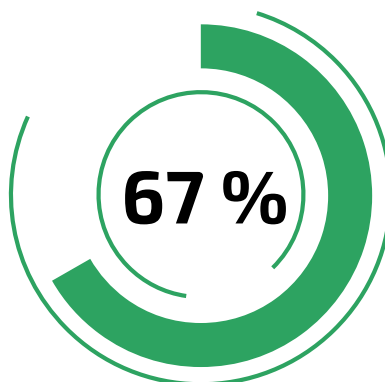

67 % de la population ne connaît ni les causes de parodontite ni les méthodes efficaces de traitement.

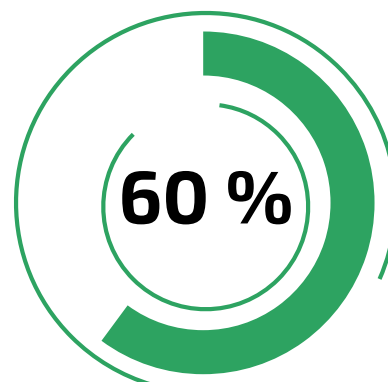


60 % de la population souffre d'au moins une maladie parodontale.

ATTENTION !

- **L'irrigation des poches parodontales est la procédure dentaire la plus sous-estimée.**
- **L'irrigation des poches parodontales prend 2-3 minutes et devrait accompagner presque chaque procédure effectuée par le dentiste.**
- **Seule l'irrigation régulière des poches parodontales permet d'éliminer entièrement les symptômes de la maladie. Cette procédure devrait être effectuée tous les trois mois.**

INFLAMMATION DU PARODONTE – EXEMPLES

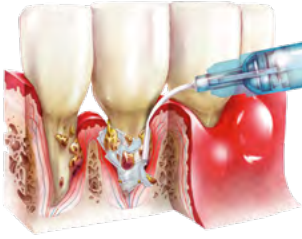

INFLAMMATION DES POCHES PARODONTALES

L'inflammation des poches parodontales autour des incisives inférieures est la cause principale de la perte de dents saines chez les adultes.


55 % de la population entre 35-44 ans a 2-4 poches parodontales qui exigent un traitement médical, y compris le comblement osseux.



TROUBLES D'ÉRUPTION DES DENTS, NOTAMMENT DES DENTS DE SAGESSE

Le péricoronarite est une inflammation fréquente de la gencive, qui apparaît lorsqu'une dent en voie d'éruption reste recouverte par une partie de gencive. L'étendue et l'intensité de l'inflammation dépendent de la position de la dent dans la cavité buccale, c'est-à-dire de la possibilité de la nettoyer. Il s'agit surtout des dents de sagesse, des canines supérieures, des prémolaires inférieures et des incisives serrées.

90 % des personnes ont eu des problèmes liés à l'éruption d'une dent de sagesse.

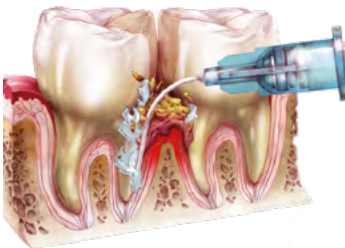


AUTOUR DES RESTAURATIONS DE CLASSE II

Des restaurations de classe II mal faites conduisent à une accumulation de résidus alimentaires dans l'espace interdentaire.

Le nettoyage de cet espace est difficile, voire impossible, ce qui cause toujours des inflammations des gencives ou du parodonte.

Selon un groupe de médecins interrogés, c'est le cas de parodontite le plus fréquent.

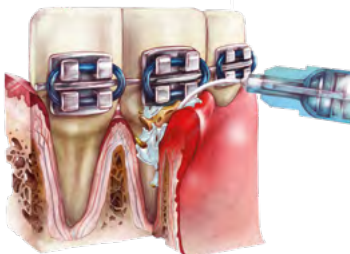

AUTOUR DES APPAREILS ORTHODONTIQUES

Le nettoyage imprécis de l'espace entre l'appareil orthodontique et la gencive cause l'accumulation des résidus alimentaires ce qui conduit à la gingivite.


D'après un groupe de médecins interrogés, 30 % des personnes avec un appareil orthodontique souffrent de la parodontite.



POCHES PARODONTALES AVOISINANT UNE DENT À EXTRAIRE

Le nettoyage imprécis de l'espace entre l'appareil orthodontique et la gencive cause l'accumulation des résidus alimentaires ce qui conduit aux gingivites.

Chaque année en France, environ 50 mille dents endommagées par les caries sont extraites. La plupart des cas sont liés à l'inflammation des poches parodontales.

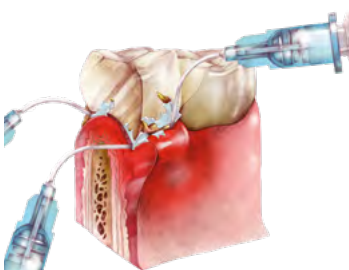


SOUS LES PROTHÈSES DENTAIRES

Les résidus alimentaires peuvent s'accumuler sous les restaurations dentaires telles que bridges ou couronnes. Le nettoyage de ces espaces est très difficile à effectuer à la maison, voire impossible.


En cas de prothèses dentaires, le brossage des dents est insuffisant. Seulement 10 % de la population utilise les fils dentaires. Encore moins (juste 5 %) utilise un rince-bouche.

INFLAMMATION DES POCHES PARODONTALES

SYMPTÔMES

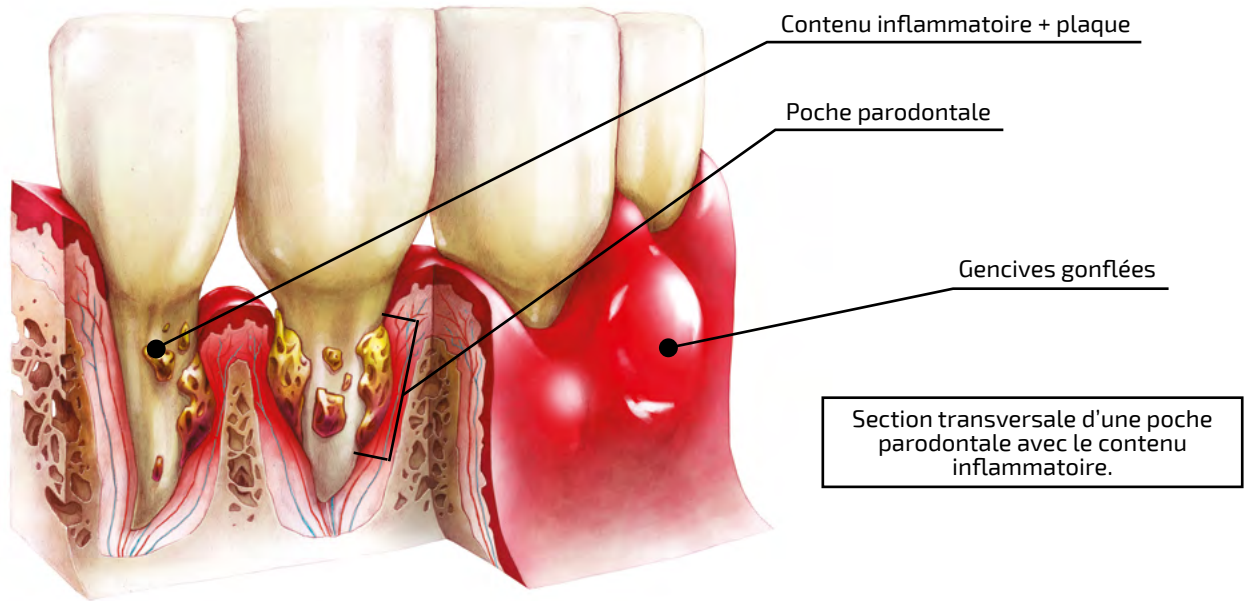

APPLICATION

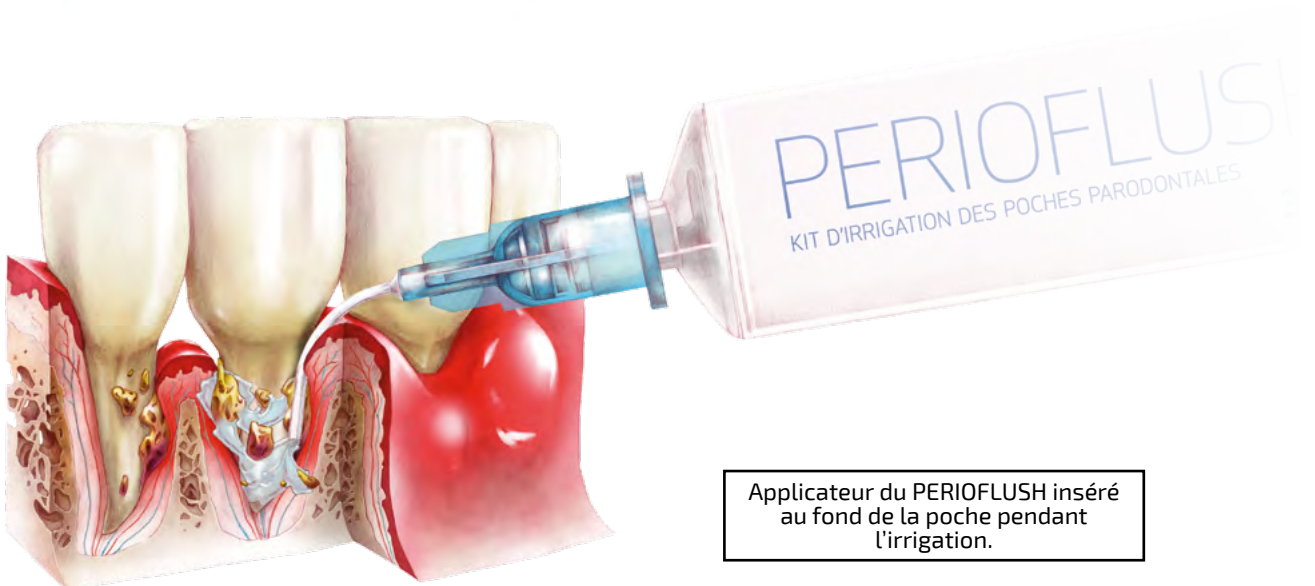


EFFET



La poche parodontale nettoyée, le contenu inflammatoire entièrement retiré, le gonflement soigné, la gencive adhère à la surface radiculaire, la formation d'une attache épithéliale est possible.

TROUBLES D'ÉRUPTION DES DENTS

SYMPTÔMES

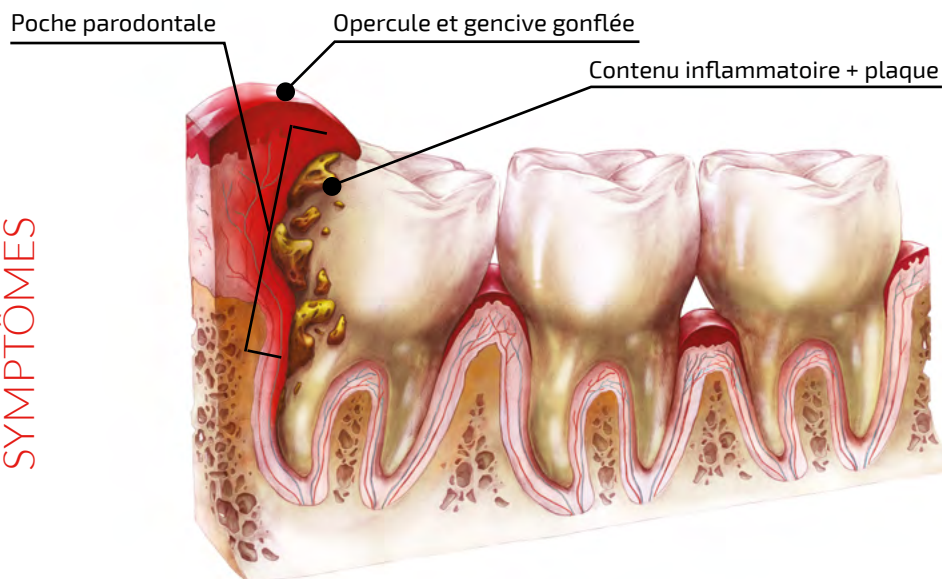


Section transversale d'une poche parodontale avec une péricoronarite autour de la troisième molaire (dent de sagesse inférieure).

APPLICATION



Applicateur du PERIOFLUSH inséré au fond de la poche pendant l'irrigation.


EFFET

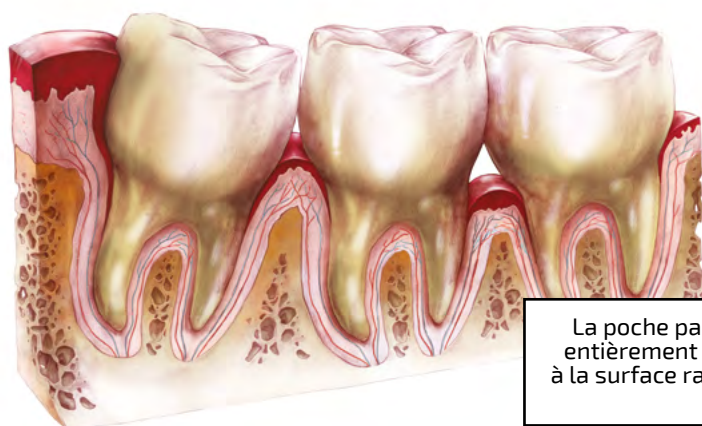


La poche parodontale nettoyée, le contenu inflammatoire entièrement retiré, le gonflement soigné, la gencive adhère à la surface radiculaire, la formation d'une attache épithéliale est possible.

AUTOUR DE RESTAURATIONS DE II CLASSE


SYMPTÔMES

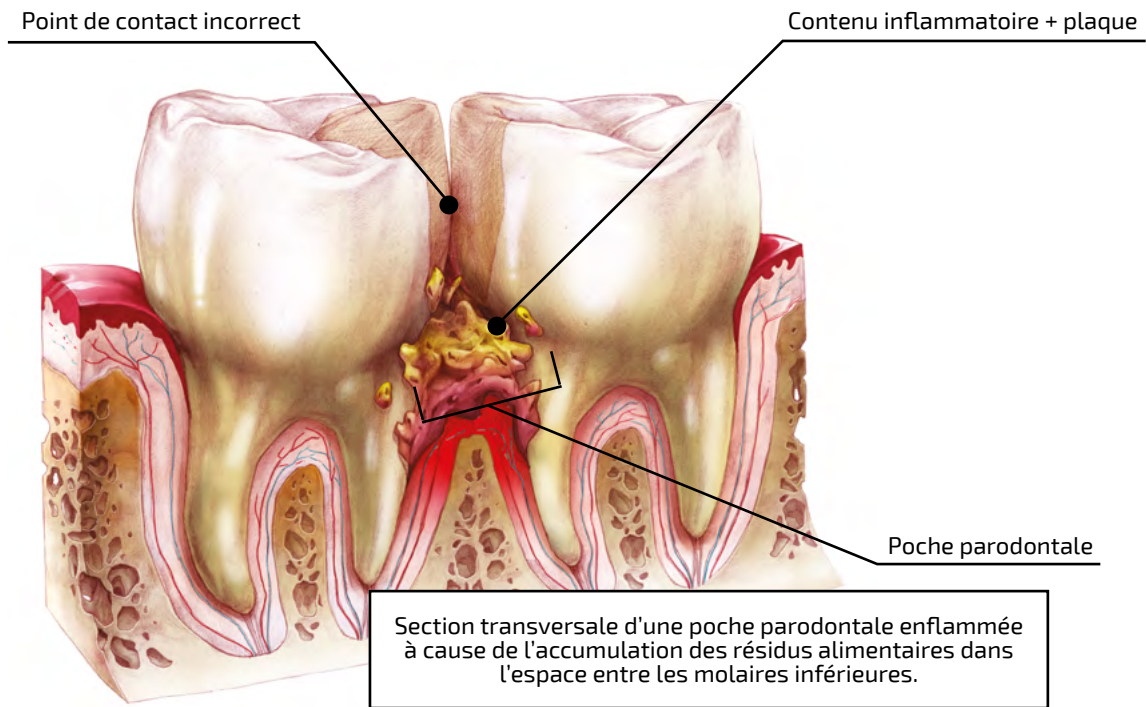

APPLICATION

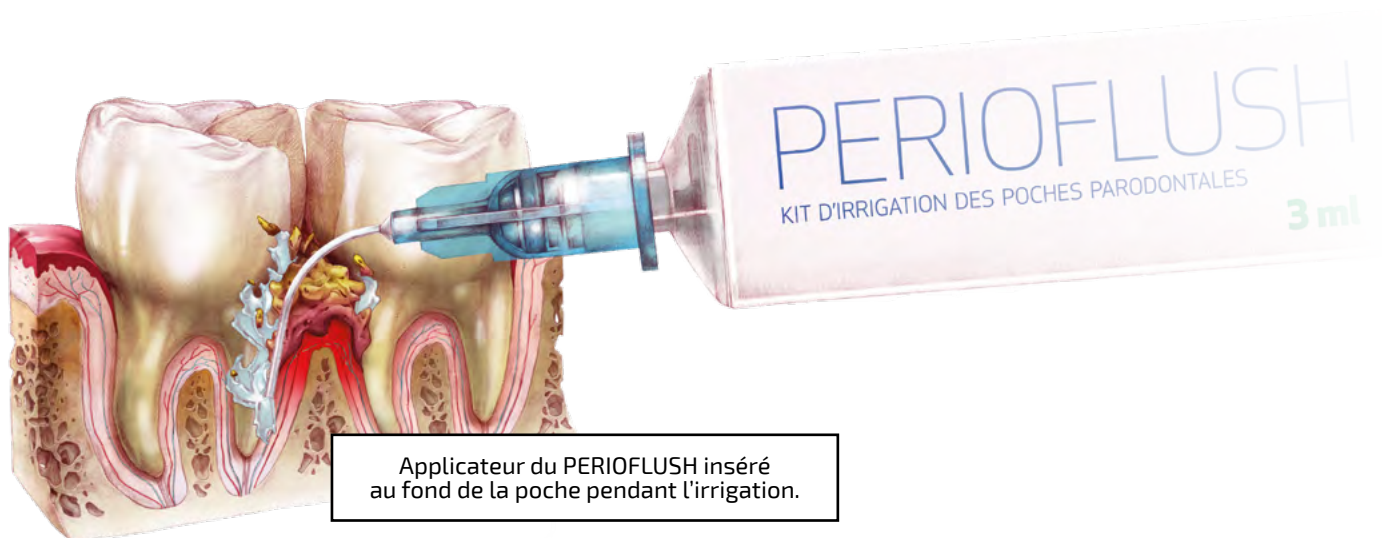


EFFET

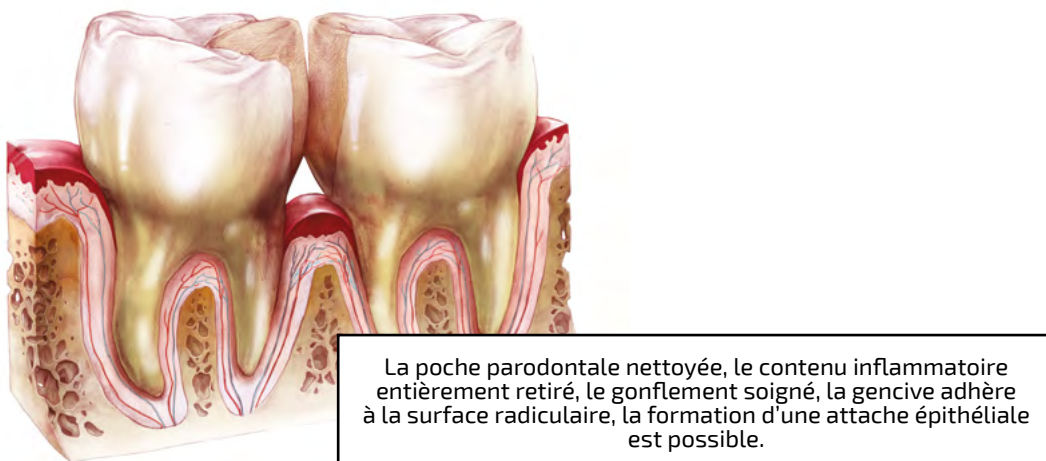

AUTOUR DES APPAREILS ORTHODONTIQUES

SYMPTÔMES

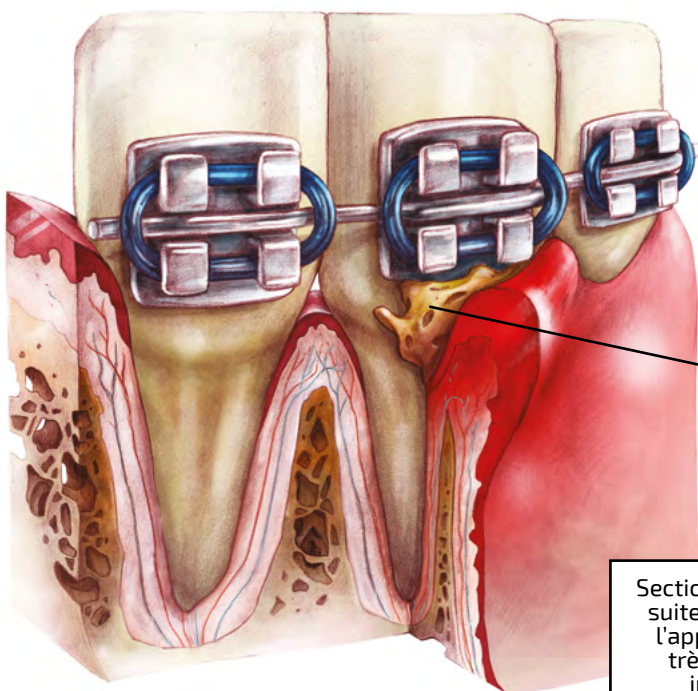

Contenu inflammatoire + plaque

Section transversale d'une poche parodontale apparue suite à l'accumulation des résidus alimentaires entre l'appareil orthodontique et la gencive. Le nettoyage très difficile, voire impossible, mène toujours aux inflammations des gencives et du parodonte.

APPLICATION



Applicateur du PERIOFLUSH inséré au fond de la poche pendant l'irrigation.


EFFET



La poche parodontale nettoyée, le contenu inflammatoire entièrement retiré, le gonflement soigné, la gencive adhère à la surface radiculaire, la formation d'une attache épithéliale est possible.

POCHES PARODONTALES VOISINANT LES DENTS À EXTRAIRE

SYMPTÔMES

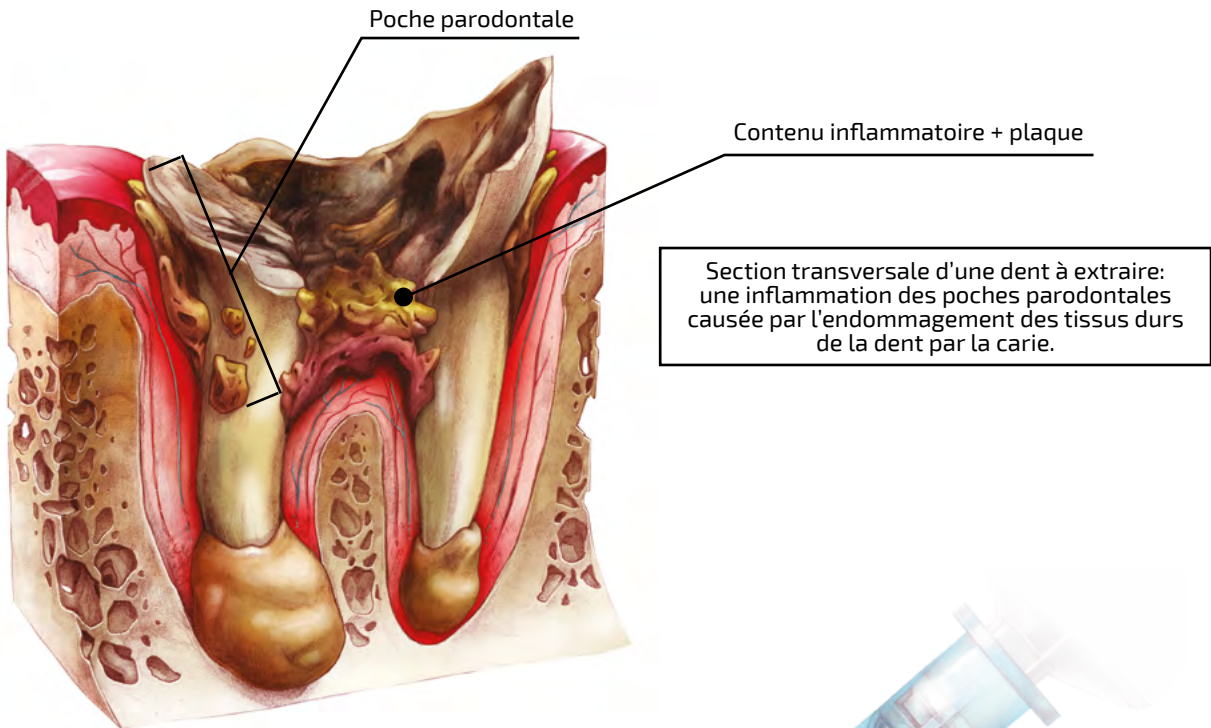

APPLICATION

Applicateur de PERIOFLUSH inséré au fond de la poche pendant l'irrigation.




EFFET




Le contenu inflammatoire est éliminé, l'insertion d'un outil d'extraction (par exemple un élévateur) est possible.

SOUS LES PROTHÈSES DENTAIRES


SYMPTÔMES

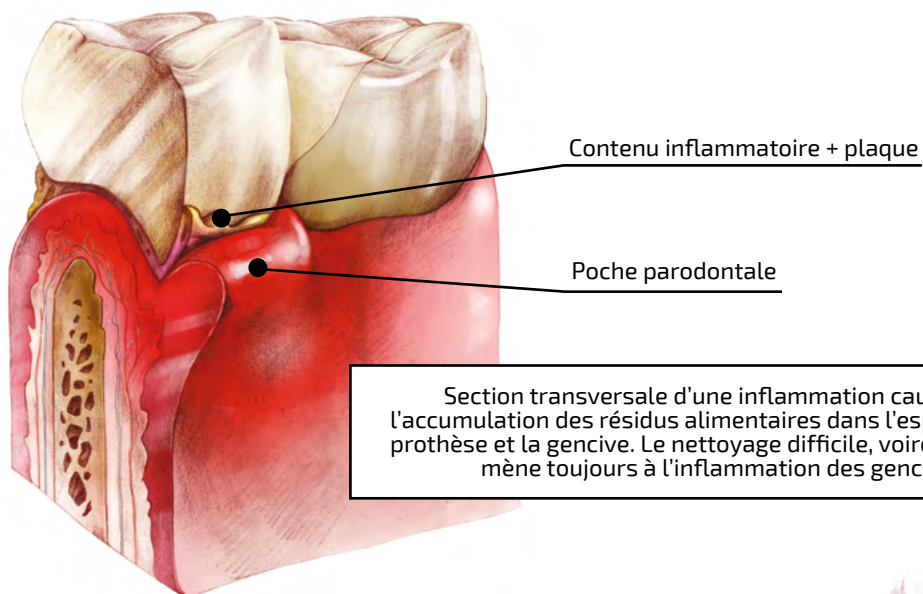

APPLICATION

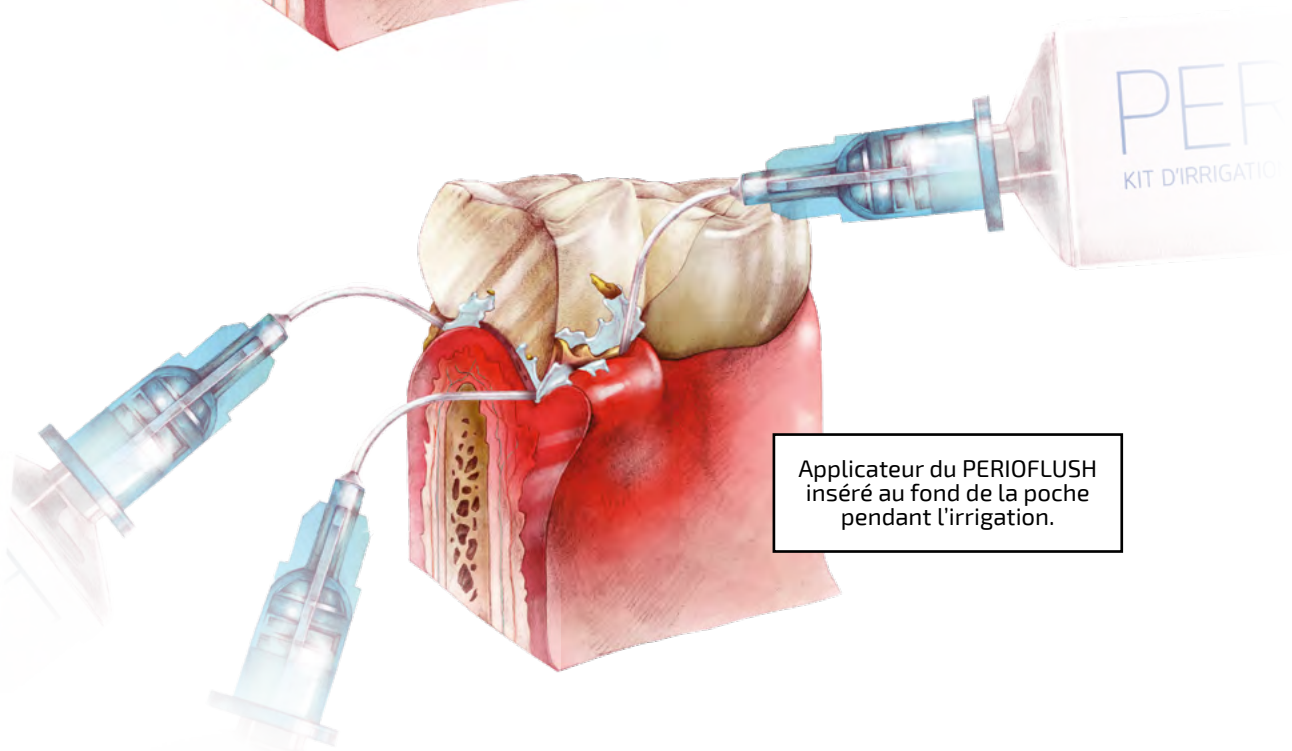

EFFET

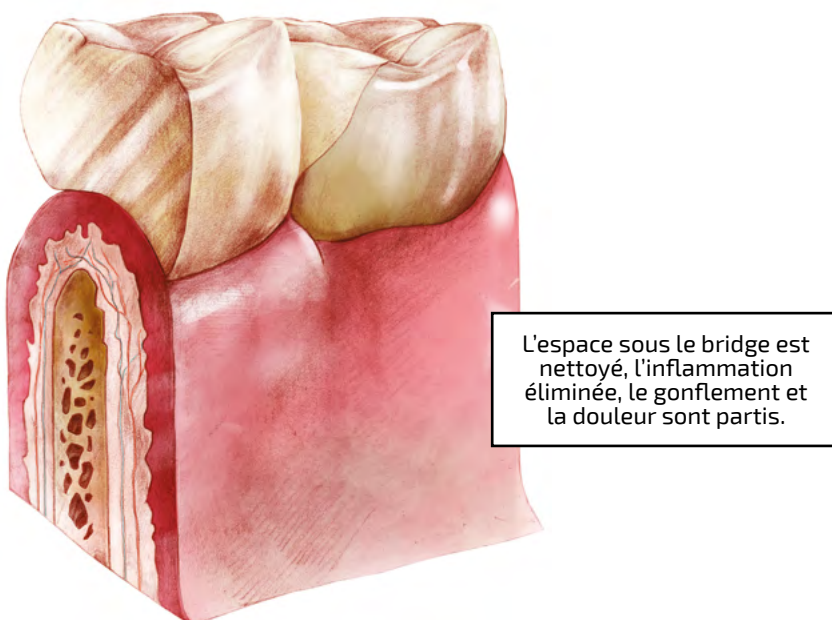



ARKONA
www.arkona.fr